

PRODUCT NAAM: Detectaplast Burn Care Gel
ALGEMENE NAAM: Sterile Burn Gel

SPECIFICATIES

REF 9302	Burn gel dressing 10 x 10 cm - 20 pcs/box
REF 9303	Burn gel dressing 20 x 20 cm - 6 pcs/box
REF 9304	Burn gel dressing 30 x 40 cm - 6 pcs/box
REF 9308	Burn gel 118 ml - 6 pcs/box
REF 9320	Burn Care Kit
REF 9321	Burn Care Kit XL

PRODUCT OMSCHRIJVING

Detectaplast Burn Care Gel is een in water oplosbare gel op basis van water die de hitte uit een brandwond trekt terwijl het de pijn verlicht, de huid koelt en beschermt tegen besmetting door de lucht. Door Detectaplast Burn Care Gel zo snel mogelijk aan te brengen, wordt de hitte van de brandwond afgevoerd en wordt voorkomen dat de hitte dieper in de huid doordringt. De gel bestaat voor 90% uit gezuiverd water en heeft hetzelfde verkoelende effect als water, maar omdat hij dik is, blijft hij op de brandwond zitten en verdampt hij zeer langzaam. Detectaplast Burn Care Gel is volledig oplosbaar in water. Resterende Burn Care Gel op een brandwond wordt verwijderd bij contact met water. Detectaplast Burn Care Gel is steriel door Gamma en is vijf jaar houdbaar.

GEBRUIK VOOR :

Detectaplast Burn Care Gel wordt voornamelijk gebruikt om brandwonden af te dekken en de wonden vochtig te houden. Dit product dient als noodvoorziening bij 1e en 2e graads brandwonden. De gel trekt de hitte uit de brandwond terwijl het de pijn verlicht, de huid afkoelt en beschermt tegen besmetting door de lucht.

HOE TE GEBRUIKEN

I. KOMPRES

Voor brandwonden door hitte :

Scheur het zakje Detectaplast Burn Care open en leg het verband over de plaats van de wond. Knijp de resterende gel uit het zakje gelijkmatig uit over het verband. Laat het verband minstens 30 minuten op de aangetaste huid liggen. Zet het Detectaplast Burn Care verband indien nodig vast met een luchtdoorlatend wondverband. Zorg ervoor dat u niet te veel druk uitoefent. Roep altijd medische hulp in als de brandwond ernstig is of een groot gebied bedekt. Detectaplast Burn Care Gel is oplosbaar en kan indien nodig worden afgespoeld met zoutoplossing of steriel water.

Voor chemische brandwonden :

Als de chemische stof vloeibaar is, moet het getroffen gebied gedurende ongeveer 15-20 minuten met lauw water* worden afgespoeld. Als de chemische stof in poedervorm is, moet deze voorzichtig van het getroffen gebied worden geborsteld, waarna het wondgebied gedurende ongeveer 15-20 minuten met lauw water* moet worden afgespoeld. Volg de instructies zoals bij hitteverbranding.

II. GEL

Voor brandwonden door hitte :

Breng een royale laag gel aan op het getroffen gebied, zodat het de wond bedekt. Niet wrijven. Laat het minstens 30 minuten op de wond zitten. Zoek altijd medische hulp als de brandwond ernstig is of een groot gebied bedekt. Detectaplast Burn Care Gel is oplosbaar en kan indien nodig afgespoeld worden met zoutoplossing of steriel water.

Voor chemische brandwonden :

Als de chemische stof vloeibaar is, moet het getroffen gebied gedurende ongeveer 15-20 minuten met lauw water* worden afgespoeld.

Als de chemische stof in poedervorm is, moet deze voorzichtig van het getroffen gebied worden afgeborsteld, waarna de wond gedurende ongeveer 15-20 minuten met lauw water* moet worden afgespoeld.

Volg de instructies zoals bij hitteverbranding.

WAARSCHUWING

1. Niet gebruiken op 3e graads brandwonden
2. Enkel eerste hulp bij brandwonden, schaafwonden & zonnebrand. Niet gebruiken voor genezing.
3. Alleen voor eenmalig gebruik. Niet gebruiken als de verpakking open of beschadigd is.
4. Wrijf de gel niet in het getroffen gebied.
5. Stop het gebruik onmiddellijk als er irritatie optreedt.
6. Zoek altijd medische hulp bij ernstige brandwonden of als de brandwond een groot gebied beslaat.

CONDITIES STOCKAGE

Dit product moet worden bewaard bij een relatieve vochtigheid van maximaal 80%. Bewaren beneden 40°C in een goed geventileerde ruimte. Gescheiden houden van giftige stoffen.

***De ideale temperatuur voor water ligt tussen 15-25°C.**

Bij zeer grote brandwonden en te koud water kan er gevaar zijn voor onderkoeling.

Te koud water doet pijn. Als de patiënt aangeeft pijn te hebben tijdens het spoelen, betekent dit dat het water te koud is.



REF 9320 – Burn Care Kit

REF 9302	Brandwondenkompres 10 x 10 cm	3 x
REF 9303	Brandwondenkompres 20 x 20 cm	1 x
REF 9308	Brandwondengel 118 ml	1 x
REF 9131	Paar handschoenen nitril blauw	3 x
REF 9084	Elastisch verband 8cmx4m	4 x
REF 5007	Schaar	1 x
	Gebruiksaanwijzing	1 x

REF 9321 – Burn Care Kit XL

REF 9302	Brandwondenkompres 10 x 10 cm	4 x
REF 9303	Brandwondenkompres 20 x 20 cm	2 x
REF 9304	Brandwondenkompres 30 x 40 cm	1 x
REF 9308	Brandwondengel 118 ml	1 x
REF 9131	Paar handschoenen nitril blauw	6 x
REF 9084	Elastisch verband 8cmx4m	7 x
REF 5007	Schaar	1 x
	Gebruiksaanwijzing	1 x